

## **CALMINEX® HOT** **Almofada térmica adesiva**

### **Mantém o calor onde é preciso por 8 horas**

Alívio das dores: musculares, articulares, nas costas, distensões e cólicas.

Inodoro e não medicamentoso

Contém 1 Almofada térmica adesiva descartável (10 cm x 13,5 cm)

O calor é uma terapia natural utilizada para aliviar a dor e acelerar o processo de recuperação. **CALMINEX HOT** é uma Almofada térmica adesiva inodora e não medicamentosa que fornece calor em cerca de 20 minutos e mantém uma temperatura média acima de 40°C por 8 horas. Elimina a rigidez muscular e melhora a circulação sanguínea no local da aplicação.

### **Principais vantagens**

- **Fácil de usar** – ativado pelo ar, é só abrir e usar. Não necessita ser aquecida por nenhum outro meio;
- **Confortável e Prático** – por ser um adesivo pequeno e fino, não impede as atividades diárias do usuário. Ou seja, o usuário pode sair à rua, trabalhar, fazer ginástica, etc, enquanto usufrui dos benefícios que **CALMINEX HOT** proporciona;

### **Indicações**

Alívio das dores: musculares, articulares, nas costas, distensões e cólicas.

### **Contra-indicações**

**NÃO UTILIZAR O PRODUTO:**

- No mesmo local (área) da pele por mais de 8 horas por dia;
- Em crianças menores de 12 anos de idade e idosos, a menos que o uso seja supervisionado por uma pessoa responsável;
- Na pele irritada ou ferida;
- Exatamente após ter se ferido – o calor pode piorar o inchaço ou o hematoma;
- Com nenhum outro artifício que produza calor;
- Se o usuário for incapaz de remover o adesivo;
- Com cremes, géis ou unguentos medicamentosos.

### **Precauções**

Fale com um farmacêutico ou médico antes de usar **CALMINEX HOT** caso você:

- Tenha problema de circulação (má circulação), diabetes, artrite ou qualquer outra condição médica séria;
- Apresente problemas na pele como eczemas, psoríase ou tenha pele muito sensível;
- Esteja grávida.

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

### **Advertências**

Não corte, rasgue ou danifique a almofada. Não a utilize se estiver rasgada ou danificada.

A almofada contém pó de ferro que pode ser nocivo se ingerido. Caso haja ingestão do produto, procure imediatamente socorro médico, levando sua embalagem.

**NÃO COLOQUE NO MICROONDAS OU RE-ESQUENTE O PRODUTO APÓS O USO, DESCARTE-O EM LOCAL APROPRIADO.**

### **MODO DE USAR**

**NÃO APLICAR SE A PELE ESTIVER IRRITADA OU FERIDA.**

Antes de aplicar o produto, tenha certeza de que a pele esteja limpa, seca e não gordurosa.

Abra com cuidado a embalagem a fim de não danificar a almofada.

Retire a almofada da embalagem com cuidado, remova o papel protetor da parte adesiva e aplique-a sobre a pele no local da dor. Uso externo.

Após a abertura da embalagem, a almofada imediatamente começará a se aquecer. Quando o produto esfriar completamente e “empedrar”, destaque-o com cuidado e jogue-o fora.  
PRODUTO DESCARTÁVEL.

**Precauções para quando estiver utilizando a almofada:**

- Não deite sobre a almofada, mesmo quando estiver na cama, e não aplique pressão enquanto a estiver utilizando;
- Remova a almofada imediatamente caso esteja muito quente ou caso sua pele se irrite;
- Contate seu médico se a dor não desaparecer.

**Cuidado de Conservação:** conservar o produto em local seco e fresco.

**Prazo de validade:** O prazo de validade de **CALMINEX HOT** encontra-se impresso na embalagem. Em caso de vencimento, inutilize o produto.

**Composição:**

**GERAÇÃO DE CALOR:** pó de ferro; carbono ativado; polímero de absorção de água; tripolifosfato de sódio; sulfito de sódio; solução de cloreto de sódio.

**CAMADA DE VENTILAÇÃO:** tecido não-texturizado de náilon repuxado; película de polietileno de ventilação.

**CAMADA ADESIVA:** película de polietileno de baixa densidade linear (BDL) /Película de polietileno de Metaloceno; Poliéster e Poliolefina não-texturizados; Adesivo; Película de poliéster.

**EMBALAGEM EXTERNA COM VEDAÇÃO CONTRA O AR:** Polipropileno; Película de poliéster revestida de alumínio; Película de polietileno; Película de metil-metacrilato de etileno.

Registro ANVISA nº 10009300005

Farm. Resp.: Nami Lavigne Nakano CRF-RJ 8.666

Importado por:

MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Estrada dos Bandeirantes, 3091 - Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Indústria Brasileira

Fabricado por:

Mycoal Co., Ltd.

388, Minakawajounai-Cho

Tochigi-City, Tochigi-Pref

Japão

® Marca Registrada

Central de Atendimento 08000-117788 - Cx. Postal 18388 - CEP 04626-970.

Lote: Fab.: Val.:

CALHT 01F4/jan/08