

- Código: 71873BR10U  
- DWN: 0249001  
- Dimensões: 115 x 210 mm  
- Laetus: 132  
- Escala: 100%

Nº DE CORES: 01 COR

PMS  
Black U



#### INSTRUÇÕES DE USO

**DUPLAÇÃO: Lubrificante e hidratante da superfície ocular**

# Optive®

Lubrificante Ocular

Solução Oftálmica Estéril

#### APRESENTAÇÃO:

A solução oftálmica estéril - Optive® está acondicionada em frasco plástico conta-gotas contendo 10ml ou 15ml, para via de administração tópica ocular.

#### COMPOSIÇÃO:

Optive® contém: glicerina; carmelose sódica; eritritol; levocarmatina; ácido bórico; borato de sódio decaidratado; citrato de sódio diidratado; cloreto de potássio; cloreto de cálcio diidratado; cloreto de magnésio hexaidratado; punité® (complexo de oxícloro) e água purificada.

As substâncias contidas na solução de Optive® lhe conferem características de solução muito próximas da lágrima natural e foram escolhidas para proporcionar máximo conforto para os olhos. Os componentes se combinam com as lágrimas do usuário para proporcionar melhora do desconforto ocular e também age como protetor contra as irritações oculares. O produto começa agir logo após a instilação.

#### INDICAÇÕES

Optive® é uma formulação de dupla ação: lubrificante e hidratante da superfície ocular, proporcionando alívio da ardência, irritação, secura ocular, sensação de areia e corpo estranho que podem ser causados por poeira, fumaça, sol, vento, ar seco, ar condicionado. Optive® age também como protetor contra as irritações oculares.

#### CONTRA-INDICAÇÕES

Optive® é contra-indicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

#### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Optive® não deve ser utilizado se a solução mudar de coloração.

O uso do produto é exclusivamente externo.

Aos usuários de lentes de contato: Tirar as lentes antes de aplicar Optive® e aguardar pelo menos 15 minutos para recolocá-las.

A aplicação do lubrificante em geral não causa alterações da visão. Caso ocorra leve borramento da visão logo após a aplicação, recomenda-se aguardar até que a visão retorne ao normal antes de dirigir veículos ou operar máquinas.

Interrompa o uso no caso do aparecimento de reações indesejáveis.

Manter fora do alcance de crianças.

#### MODO DE USO

Optive® é um lubrificante límpido e incolor, e deve ser usado exclusivamente nos olhos.

Não utilizar Optive® caso haja sinais de violação e/ou danificações do frasco.

Não encostar a ponta do frasco nos olhos, nos dedos e nem em outra superfície qualquer, para evitar a contaminação do frasco e da solução.

Delicadamente, puxar a pálpebra inferior para baixo até formar uma pequena bolsa.

Aplicar 1 a 2 gotas nos olhos, tantas vezes quantas necessárias.

Para os usuários de lentes de contato gelatinosas ou hidrofilicas, tirar as lentes antes de aplicar Optive® e aguardar, pelo menos 15 minutos para recolocá-las após a aplicação do produto.

Fechar bem o frasco depois de usar.

Optive® é geralmente bem tolerado, podendo causar borramento temporário da visão após a instilação, devido à sua viscosidade.

#### CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO

Optive® não requer condições especiais para armazenamento, deve ser conservado antes ou depois de aberto, em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).



Sentido de Leitura  
Cód. Laetus n° 132



Sentido de Leitura  
Cód. Laetus n° 132



Sentido de Leitura  
Cód. Laetus n° 132

O prazo de validade de 24 meses encontra-se impresso na embalagem externa. Não utilize após a data de vencimento.

Produto Estéril pelo Método de Filtração.

Farm. Resp.: Dra. Maria Paula Marques - CRF-SP nº 11.682  
Registro ANVISA nº 80143600086



**Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia**

**Fabricado e Distribuído por:**

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Av. Guarulhos, 3272

CEP: 07030-000 - Guarulhos - SP

CNPJ: 43.426.626.0009-24

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

71873BR10U - Laetus: 132

Serviço de Atendimento ao Consumidor  
**0800-144077**  
Discagem Direta Gratuita